

Link do produktu: <https://www.fraida.pl/okulary-ajurwedyjskie-bezsoczewkowe-uniwersalne-z-bocznymi-przeslonami-p-4684.html>



Okulary ajurwedyjskie bezsoczewkowe - uniwersalne z bocznymi przesłonami

Cena	129.90 zł
Dostępność	niedostępny online - sprawdź w sklepie stacjonarnym
Numer katalogowy	jaganath03

Opis produktu

**ORYGINALNE OKULARY KOREKCYJNE - AJURWEDYJSKIE - POPRAWIĄ TWOJE OCZY !!!
GRATIS ochronny futerał!
Model z bocznymi przesłonami.**

Masz kłopoty ze wzrokiem typu starczowzroczność, dalekowzroczność, wczesny etap zaćmy, krótkowzroczność, astygmatyzm, zmęczenie oczu, jesteś w stanie pooperacyjnym oczu?

Okulary korekcyjne w sposób naturalny mogą naprawić Twoją wadę wzroku.

Okulary niesoczewkowe Jaganath jako jedyne w Polsce posiadają wpis wyrobu medycznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Okulary zostały pozytywnie ocenione przez Katedrę i Klinikę Chorób Oczu Akademii Medycznej w Warszawie

O rewelacyjnych właściwościach okularów przekonaj się już po pierwszym założeniu - ostrość widzenia ewidentnie poprawia się.

ZALECENIA I UWAGI

Stosując okulary niesoczewkowe można uzyskać poprawę ostrości wzroku zbliżoną do korekcji optymalnej u pacjentów z wczesnymi postaciami zaćmy, w pseudofakii, w starczowzroczności, normowzroczności, krótkowzroczności niskiej i nadwzroczności.

Stosowanie tych okularów w przypadku afakii i krótkowzroczności wysokiej jest nieskuteczne. Najlepsze wyniki otrzymano u pacjentów z zaćmą korową i w pseudofakii we wczesnym okresie pooperacyjnym przed dobraniem ostatecznej korekcji optymalnej oraz w wyniku starczowzroczności przy korekcji do bliży.

Ze względu na ograniczenie pola widzenia i występowanie w obserwowanym polu rozmytych granic między otworami komfort widzenia w okularach niesoczewkowych jest gorszy niż w okularach optycznych.

Obserwuje się przesunięcie punktu bliży w stronę oka w normowzroczności, nadwzroczności, starczowzroczności, zaćmie korowej i pseudofakii. W krótkowzroczności punkt bliższy jest przesunięty w stronę oka z powodu występującej wady wzroku, w afakii stosowanie okularów niesoczewkowych nie jest skuteczne.

Okulary wymagają treningu w celu przystosowania do patrzenia. Część pacjentów zgłaszała objawy zawrotów głowy w trakcie używania okularów niesoczewkowych do dali. Innych negatywnych objawów subiektywnych nie stwierdzono.

Ośrodek Holistycznej terapii wzroku zaleca używanie okularów wieloprzesłonowych wszystkim osobom stale noszącym okulary profilaktycznie w celu ożywienia naturalnych funkcji oka. Stałe noszenie okularów soczewkowych powoduje zmniejszenie naturalnej ruchliwości oka, co może w konsekwencji prowadzić do sukcesywnego pogarszania się ostrości widzenia.

STOSOWANIE OKULARÓW KOREKCYJNYCH - MULTIPRZESŁONOWYCH:

Należy pamiętać, że noszenie okularów multiprzesłonowych jest dla oczu zupełnie nowym doświadczeniem, w związku z czym tuż po założeniu oko musi przyzwyczać się przez kilka minut do patrzenia przez małe otworki. Nie należy się tym zrażać. Na początku zaleca się krótkotrwałe używanie okularów ze stopniowym wydłużaniem czasu używania. Okulary wieloprzesłonowe nie pomniejszają ani nie powiększają widzianego obrazu, korygują jednak wady widzenia i dlatego obraz postrzegamy ostrzej.

Ten efekt jest najważniejszy. Należy starać się zapamiętać go. Tuż po zdjęciu okularów jeszcze przez chwilę widzimy ostrzej. Tę chwilę przez ćwiczenia musimy wydłużyć. Wtedy osiągniemy poprawę wzroku - cel używania okularów multiprzestronowych.

Korzystne dla użytkownika jest:

1. Używać okularów dostosowując czas ich noszenia do indywidualnych możliwości, (dbając przy tym by czas ten był dostatecznie długi. nawet do dwóch godzin dziennie) podczas czytania, pisania, oglądania TV, w kinie, podczas spacerów. Ważne jest, żeby oglądany obraz czy tekst był silnie oświetlony.
2. Patrzyć przez okulary w dal (najlepiej w przestrzeni), a następnie w pomieszczeniach mieszkalnych.
3. Bardzo ważna jest systematyczność.
4. Używać okularów bezpośrednio, nie na szkła kontaktowe czy inne okulary.
5. Ćwiczyć oczy przez częste mruganie, szczególnie podczas czytania, mrugając patrząc w dal.
6. Nie należy używać tych okularów podczas prowadzenia samochodu, gdyż ograniczają pole widzenia.
7. Zauważalnych efektów używania okularów można spodziewać się w niektórych przypadkach już po sześciu tygodniach, jednak po upływie dłuższego okresu ich używania poprawa wzroku będzie coraz wyraźniejsza.

Tajemnicą działania tych okularów jest właśnie patrzenie środkiem oka, tylko na to co jest dokładnie na wprost oczu z wyłączeniem widzenia peryferyjnego. Widzimy wyraźnie, gdyż promienie światła wchodzące do oka pod kątem prostym nie są w żaden sposób załamywane i obraz na siatkówce jest (przez to) zawsze wyraźny. Jest to zarazem trening dla całego systemu percepcji wzrokowej - uczymy się widzieć ostro.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA:

Do czego służą okulary ajurwedyjskie?

Okulary te służą do rehabilitacji wzroku. Opracowano je w oparciu o zalecenia ajurwedy. Ajurweda to staroindyjska nauka obejmująca wiedzę z zakresu fizjologii, biologii, botaniki, zielarstwa, chirurgii, itp.

Zaleca się używanie okularów niesoczewkowych w celu ożywienia naturalnych funkcji oka osobom stale noszącym okulary soczewkowe.

Polecamy również nasze okulary na stany pooperacyjne oczu.

Kiedy możemy zauważyć pierwsze efekty noszenia okularów?

O rewelacyjnych właściwościach naszych okularów można przekonać się już po pierwszym założeniu - ostrość widzenia ewidentnie poprawia się.

Komu zalecane jest noszenie okularów niesoczewkowych?

Okulary niesoczewkowe są uniwersalne tzn, leczą skutecznie różnego rodzaju wady widzenia przez stymulację naturalnych funkcji oka w zależności od indywidualnych potrzeb danej osoby.

Jak używać okularów multiprzestronowych?

Noszenie okularów multiprzestronowych jest dla oczu zupełnie nowym doświadczeniem, w związku z tym, tuż po założeniu oko musi przyzwyczać się przez dłuższą chwilę do patrzenia w inny sposób, poprzez małe otworki. Należy przyzwyczać się do nowego sposobu patrzenia. Na początku zaleca się krótkotrwałe używanie okularów ze stopniowym wydłużaniem czasu używania. Należy eksperymentować z okularami tak, aby jak najlepiej dostosować je do swoich możliwości widzenia.

Na co dzień osoby z krótkowzrocznością powinny używać okularów do patrzenia na rzeczy odległe np. podczas spacerów, a osoby dalekowzroczne potrzebują stosować je do czytania, pisania itp. W poszczególnych przypadkach wad widzenia należy eksperymentować z okularami, żeby dostosowywać je do swojego sposobu widzenia.

Stosowanie okularów w stanach pooperacyjnych wymaga szczególnej uwagi pacjenta, żeby nie nadużywać możliwości oczu.

Jakie zastosowanie mają okulary ajurwedyjskie w stanach pooperacyjnych oczu?

Okulary wielootworkowe mają zastosowanie w stanach pooperacyjnych zmniejszając ruchliwość oczu, działają one w szerokim zakresie dioptrii (plus i minus) co ułatwia widzenie pacjentom. Dodatkową zaletą używania tych okularów po operacjach jest zmniejszenie ilości światła docierającego do oczu.

W jaki sposób okulary korygują wadę wzroku?

Okulary wielootworkowe nie pomniejszają ani nie powiększają widzianego obrazu, korygują jednak wady widzenia i dlatego obraz postrzegamy ostrzej. Ten efekt jest najważniejszy. Główną cechą okularów jest fakt, że korygują zarówno krótkowzroczność jak i dalekowzroczność oraz inne wady widzenia. Jednak sposób ćwiczenia oczu jest inny we wszystkich tych przypadkach.

Czy są jakieś przeciwwskazania w używaniu okularów niesoczewkowych?

Ze względu na ograniczenie pola widzenia nie należy stosować okularów do pracy na stanowiskach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku np.: stanowiska pracy wyposażone w tokarki, frezarki, piły, szlifierki itp.

Bezwzględnie nie należy stosować okularów wielootworkowych w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W jaki sposób zostały skonstruowane okulary multiprzestronowe?

W konstrukcji okularów zastosowano dwie czarne nieprzeźroczyste przesłony wielootworowe umocowane w oprawkach okularowych. Zasadą działania okularów jest uzyskanie ostrego widzenia w wyniku zastosowania przesłony wielootworowych.



Na siatkówce oka w wyniku przejścia przez poszczególne otwory powstaje obraz. Okulary wieloprzysłonowe mogą być zastosowane zarówno w nadwzroczności jak i krótkowzroczności. Ma to szczególne znaczenie w stanach pooperacyjnych, kiedy ustalenie prawidłowej korekcji widzenia jest utrudnione, a stan oczu zmienia się z dnia na dzień.

W konstrukcji okularów zastosowano 2 czarne nieprzeźroczyste, płaskie przesłony wielootworowe umocowane w oprawkach okularowych.

W przesłonie wykonano 97 otworów umieszczonych w 9 poziomych szeregach w sekwencji: 9, 10, 11, 12, 13, 12, 11, 10, 9 otworów.

Średnica otworów ok 1 mm.

Odległość otworów ok 3 mm.

Odległość pionowa szeregów ok 3 mm.

Niektóre oprawy zawierają osłony boczne.

Zasadą działania okularów jest uzyskanie ostrego widzenia w wyniku zastosowania przysłon wielootworowych. Na siatkówce oka w wyniku przejścia przez poszczególne otwory powstaje obraz w wyniku załamania promieni przyosiowych co pozwala na zwiększenie głębi ostrości.

Regulacja zauszników

Korekcyjne okulary niesoczewkowe można dopasować do głów o różnych obwodach poprzez regulację zauszników. Odginając zausznik do środka lub na zewnątrz możemy uzyskać dopasowanie okularów do głów różniących się długością obwodu nawet o 10 cm. Okulary posiadają elastyczne zauszniki.

W jaki sposób możemy dopasować okulary do obwodu głowy?

Lewą ręką trzymamy zausznik przy złączeniu (między zausznikiem a frontem oprawki), prawą ręką regulujemy zausznik odginając w wybranym kierunku (do środka lub na zewnątrz).

GRATIS: **ochronny futerał**

kolor: **brązowa oprawka, czarne przesłony**